

Avilin Balsam

spray opatrunek adhezyjny 75 ml, 250 ml

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego przeczytaj instrukcję!



Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny zabezpiecza ranę przed czynnikami zewnętrznymi.

Stosowanie instrukcji:

- Instrukcję stosowania wyrobu medycznego **Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny** należy uważać za część składową wyrobu medycznego,
- Niniejszą instrukcję używania należy przechować przez cały okres przydatności wyrobu medycznego **Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny**,

Skład / Ingredients : Polimer E (eter poliwinylolobutyłowy)

Opis działania wyrobu medycznego Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny :

Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny spełnia na uszkodzonej skórze rolę przylegającego opatrunku, tworząc barierę ochronną. Ze względu na swoją strukturę chemiczną i właściwości fizyko-chemiczne zapewnia optymalne pH i wilgotność rany; **zabezpiecza ją przed utratą wody oraz zapewnia jednoczesną wymianę gazową tworząc odpowiednie mikro-środowisko rany.** Związek ten ze względu na stabilność chemiczną jest odporny na środowisko w jakim się znajduje a jego szczególnie wysoka lepkość powoduje, że utrzymuje się na uszkodzonej skórze i skutecznie **zabezpiecza ranę przed czynnikami zewnętrznymi chroniąc ją przed zakażeniem pochodzącym z zewnątrz;** zwłaszcza w przypadku ran trudno gojących się. W przypadku ran brudnych lub zakażonych przed nałożeniem opatrunku należy ranę oczyścić i zdezynfekować. **Stosować do opatrywania ran wymagających zachowania wilgotnego środowiska.**

Sposób użycia:

Minimum raz dziennie, nanosząc na ranę z odległości 8-10 cm, ranę należy odpowiednio zabezpieczyć np. jałową gazą, W przypadku ran brudnych lub zakażonych przed nałożeniem opatrunku Avilin Balsam spray, należy ranę oczyścić i zdezynfekować.


Przeciwwskazania do stosowania;

rany z silnym krwawieniem
uczulenie na składniki preparatu

W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku poprawy, bądź nasilenia się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.

Warunki przechowywania i transportu wyrobu medycznego;

Wyrób medyczny Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny składować i transportować w zakresie temperatur od +5 °C do +50 °C.

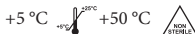

Ostrzeżenia dotyczące stosowania;

Sposób bezpiecznego używania wyrobu medycznego Avilin Balsam spray opatrunek adhezyjny:

- Nie aplikować do oczu
- Nie stosować po upływie terminu przydatności
- Nie nagrzewać powyżej 50°C
- Nie przekłwać pojemnika
- Nie wrzucać do ognia
- Chronić odzież przed poplamieniem
- Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania!

Uwaga: Chronić przed dziećmi.

Termin ważności:

Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności podanego na etykiecie jednostkowej.

Przechowywać i przewozić w temperaturze: +5 °C  **+50 °C**

Wielkość opakowania: pojemnik ciśnieniowy o zawartości 75 lub 250 ml



Wytwórca: Nes Pharma s.j. - ul. Ostrogskich 5; 33-100 Tarnów; tel.: 14 626 85 20

Dystrybutor: Nes Pharma s.j. - ul. Ostrogskich 5; 33-100 Tarnów; tel.: 14 626 85 20



umieszczony na spodzie pojemnika

