

UZARIN ŻEL 75 ml
INSTRUKCJA STOSOWANIA WYROBU MEDYCZNEGO



Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania

Uwagi :

- Instrukcję stosowania wyrobu medycznego Uzarin żel należy uważać za część składową wyrobu medycznego
- Niniejszą instrukcję stosowania należy przechować przez cały okres przydatności wyrobu medycznego Uzarin żel.

Opis wyrobu Uzarin żel / wskazania do stosowania:

Wyrób medyczny Uzarin żel 75 ml przeznaczony jest do miejscowego stosowania na nieuszkodzoną skórę w celu łagodzenia objawów związanych z urazami – stłuczeniami lub skręceniami, z występującym obrzękiem, zaczerwienieniem, krwawym podbiegnięciem (siniakiem). Uzarin żel 75 ml łagodzi również podrażnienia skóry po oparzeniach pierwszego stopnia i po ukąszeniach owadów. Główne działanie wyrobu medycznego Uzarin żel 75 ml oparte jest na fizyko – chemicznych właściwościach octanowinianu glinu. Dodatkowo obecność wyciągów z arniki górskiej i nagietka lekarskiego pozytywnie wpływa na stan i wygląd skóry.

Sposób użycia:

Wyrób medyczny Uzarin żel 75 ml należy nakładać na czystą i suchą skórę w ilości zależnej od rozmiaru urazu lub podrażnienia. Stosować 3-4 razy na dobę, pokrywając skórę cienką warstwą żelu. Po użyciu umyć ręce.

Wyrobu medycznego nie stosować dłużej niż 3-5 dni.

Nie stosować wyrobu medycznego Uzarin żel 75 ml pod opatrunkiem okluzyjnym.

Przeciwwskazania do stosowania:

- Uczulenie na składniki preparatu.
- Nie stosować na rany i uszkodzoną skórę z przerwaniami ciągłości tkanek.
- Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Ostrzeżenia w zakresie stosowania:

- W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku poprawy, bądź nasilenia się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.
- Nie aplikować do oczu i na błony śluzowe.
- Nie stosować po upływie terminu przydatności
- Po otwarciu zużyć do 12 miesięcy, po tym terminie poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania
- Chronić przed dziećmi.









Warunki stosowania, przechowywania i transportu

Wyrób medyczny Avilin płyn stosować, przechowywać oraz transportować w temperaturze +5 do +25 st C.

Wytwórca:

Nes Pharma Spółka Jawna, ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów; tel: 14 626 85 20

Wyjaśnienie zastosowanych symboli

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
|  | Wytwórca |  | Zapoznaj się z instrukcją użycia |
|  | Numer partii produkcyjnej |  | Chronić przed światłem słonecznym |
|  | Wyrób nie jest sterylny |  | Data ważności |
|  | Warunki stosowania, przechowywania i transportu |  | Po otwarciu zużyć do 12 miesięcy |