


Nazwa dokumentu	Symbol	Wydanie	Data wydania
Instrukcja stosowania Avilin Spray	A12-TD1	2	2021-02-02

Avilin Spray 90ml,400ml
Instrukcja stosowania wyrobu medycznego



1434

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania 

Uwagi:

- Instrukcję stosowania wyrobu medycznego Avilin Spray należy uważać za część składową wyrobu medycznego.
- Niniejszą instrukcję stosowania należy przechować przez cały okres przydatności wyrobu medycznego.

Skład:

- Polimer E (eter poliwinylbutylowy)

Opis działania wyrobu medycznego:

- Sterylny opatrunek adhezyjny Avilin Spray spełnia na uszkodzonej skórze rolę przylegającego opatrunku, tworząc barierę ochronną. Jest odporny na środowisko w jakim się znajduje, nie ulega degradacji i dzięki temu chroni ranę przed środowiskiem zewnętrznym i przyspiesza gojenie ran poprzez wspieranie procesu ziaminowania i epitelializacji. Jego właściwości fizyko – chemiczne, a szczególnie wysoka lepkość, powodują że utrzymuje się na uszkodzonej skórze i skutecznie zabezpiecza ranę przed czynnikami zewnętrznymi. Chroni ranę przed utratą wody, zapewniając odpowiednią jej wilgotność. Dodatkowo pozwala utrzymać właściwe pH rany i wymianę gazową.

Wskazania do stosowania:

- owrzodzenia żyłakowate goleni,
- rany niedokrwienne (najczęściej pochodzenia miażdżycowego),
- zespół stopy cukrzycowej,
- odleżyny (owrzodzenia troficzne),
- rany oparzeniowe (pochodzenia termicznego, chemicznego i elektrycznego),
- inne rany.

Sposób użycia:

- Sterylny wyrób medyczny Avilin Spray aplikować na ranę z odległości 10-15 cm, pokrywając całą jej powierzchnię, jeden raz dziennie. Po aplikacji ranę zabezpieczyć jałową gazą. Po użyciu wyrobu medycznego Avilin Spray opakowanie ponownie zamknąć zatyczką plastikową.
UWAGA: Przed użyciem należy oczyścić dyszę poprzez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku zaworka.

Przeciwwskazania do stosowania:

- rany z silnym krwawieniem,
- rany z dużą ilością rozmiękającej martwicy,
- rany z cechami zakażenia,
- rany z dużą ilością wysięku,
- rany z treścią ropną,
- uczulenie na składniki preparatu.

W wymienionych przypadkach stosowanie opatrunku adhezyjnego Avilin Spray należy skonsultować ze specjalistą.

Ostrzeżenia w zakresie stosowania:

- W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku poprawy, bądź nasilenia się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.
- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania.
- Nie aplikować do oczu.
- Nie nagrzewać powyżej 50°C.
- Nie przekłuwać pojemnika ciśnieniowego.
- Nie wrzucać do ognia.
- Chronić odzież przed poplamieniem.
- Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie stosować po upływie terminu przydatności.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Sporadycznie możliwe występowanie zaczerwienia, lub swędzenia w miejscu stosowania.

Warunki stosowania, przechowywania, i transportu:

- Wyrób medyczny Avilin Spray należy stosować w temp. +5 do +50 °C, przechowywać oraz transportować w temperaturze -5 do +50 °C.

Nazwa dokumentu	Symbol	Wydanie	Data wydania
Instrukcja stosowania Avilin Spray	A12-TD1	2	2021-02-02

Termin ważności:

- Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności.



Wytwórca: Nes Pharma spółka jawna, ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów, tel: 14 626 85 20

Dystrybutor: Nes Pharma spółka jawna, ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów, tel: 14 626 85 20

Wyjaśnienie zastosowanych symboli:




Wytwórca



Zapoznaj się z instrukcją użycia



Numer partii produkcyjnej

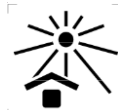

Chronić przed światłem słonecznym



Wyrób sterylny



Data ważności



Warunki stosowania przechowywania i transportu



Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania


Wersja 1/2021

Nazwa dokumentu	Symbol	Wydanie	Data wydania
Instrukcja stosowania Avilin Spray	A12-TD1	2	2021-02-02

**Avilin Spray 400ml,
Instrukcja stosowania wyrobu medycznego**



1434

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania 

Uwagi:

- Instrukcję stosowania wyrobu medycznego Avilin Spray 400ml, należy uważać za część składową wyrobu medycznego
- Niniejszą instrukcję stosowania należy przechować przez cały okres przydatności wyrobu medycznego.

Skład:

- Polimer E (eter poliwinylbutylowy)

Opis działania wyrobu medycznego:

- Sterylny opatrunek adhezyjny Avilin Spray 400ml spełnia na uszkodzonej skórze rolę przylegającego opatrunku, tworząc barierę ochronną. Jest odporny na środowisko w jakim się znajduje, nie ulega degradacji i dzięki temu chroni ranę przed środowiskiem zewnętrznym i przyspiesza gojenie ran poprzez wspieranie procesu ziarninowania i epitelializacji. Oprócz dużej wytrzymałości chemicznej, jego właściwości fizyko – chemiczne a szczególnie wysoka lepkość powodują, że utrzymuje się na uszkodzonej skórze i skutecznie zabezpiecza ranę przed czynnikami zewnętrznymi. Chroni ranę przed utratą wody, zapewniając odpowiednią jej wilgotność. Dodatkowo pozwala utrzymać właściwe pH rany i wymianę gazową.

Wskazania do stosowania:

- owrzodzenia żyłakowate goleni
- rany niedokrwienne (najczęściej pochodzenia miażdżycowego)
- zespół stopy cukrzycowej
- odleżyny (owrzodzenia troficzne)
- rany oparzeniowe (pochodzenia termicznego, chemicznego i elektrycznego)
- inne rany przewlekłe

Sposób użycia:

- Sterylny wyrób medyczny Avilin Spray 400ml aplikować na ranę z odległości 10-15 cm, pokrywając całą jej powierzchnię, jeden raz dziennie. Po aplikacji ranę zabezpieczyć jałową gazą. Po użyciu wyrobu medycznego Avilin Spray 400ml opakowanie ponownie zamknąć zatyczką plastikową.
- UWAGA: Przed użyciem należy oczyścić dyszę poprzez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku zaworka

Przeciwwskazania do stosowania:

- rany z silnym krwawieniem
- rany z dużą ilością rozmiękającej martwicy,
- rany z cechami zakażenia,
- rany z dużą ilością wysięku,
- rany z treścią ropną.
- uczulenie na składniki preparatu
- W wymienionych przypadkach stosowanie opatrunku adhezyjnego Avilin Spray 400ml należy skonsultować ze specjalistą

Ostrzeżenia w zakresie stosowania:

- W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku poprawy, bądź nasilenia się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.
- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania
- Nie aplikować do oczu
- Nie nagrzewać powyżej 50°C
- Nie przekłuwać pojemnika ciśnieniowego
- Nie wrzucać do ognia
- Chronić odzież przed poplamieniem
- Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Nie stosować po upływie terminu przydatności.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Sporadycznie możliwe występowanie zaczerwienia, lub swędzenia w miejscu stosowania.

Nazwa dokumentu	Symbol	Wydanie	Data wydania
Instrukcja stosowania Avilin Spray	A12-TD1	2	2021-02-02

Warunki stosowania, przechowywania, i transportu:

- Wyrób medyczny Avilin Spray 400ml należy stosować w temp. +5 do +50 °C, przechowywać oraz transportować w temperaturze -5 do +50 °C.

Termin ważności:

- Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności.



Wytwórca: Nes Pharma Spółka Jawna, ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów; tel: 14 626 85 20

Dystrybutor: Nes Pharma Spółka Jawna, ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów; tel: 14 626 85 20

Wyjaśnienie zastosowanych symboli



Wytwórca



Zapoznaj się z instrukcją użycia



Numer partii produkcyjnej



Chronić przed światłem słonecznym



Wyrób sterylny



Data ważności



Warunki stosowania przechowywania i transportu



Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania

Wersja 1/2021