

Avilin Gastro 110ml

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego



1434

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania



Uwagi:

- Instrukcję stosowania wyrobu medycznego Avilin Gastro 110ml należy uważać za część składową wyrobu medycznego
- Niniejszą instrukcję stosowania należy przechować przez cały okres przydatności wyrobu medycznego.

Skład:

- Polimer E (eter poliwinyllobutylowy)

Opis działania wyrobu medycznego:

- Avilin Gastro 110ml spełnia na błonach śluzowych rolę opatrunku adhezyjnego, zastępując naturalną barierę śluzową. Jest odporny na środowisko w jakim się znajduje, nie ulega degradacji i dzięki temu chroni błonę śluzową przed agresywnym środowiskiem przewodu pokarmowego.

Oprócz dużej wytrzymałości chemicznej, jego właściwości fizyko – chemiczne, a szczególnie wysoka lepkość powodują, że utrzymuje się na błonach śluzowych i skutecznie je zabezpiecza. Ma właściwości hydrofobowe, dlatego przylega do miejsc, w których występują ubytki w barierze śluzowej przewodu pokarmowego. Dodatkowo brak aktywności chemicznej powoduje, że nie wchodzi w reakcję z substancjami naturalnie występującymi w przewodzie pokarmowym. Ze względu na swoją strukturę chemiczną i właściwości fizyko-chemiczne stwarza odpowiednie środowisko do naturalnych procesów gojenia i regeneracji tkanek błony śluzowej.

Wskazania do stosowania:

Dolegliwości związane z:

- refluksem, również w postaci nadżerkowej,
- zgagą,
- nadkwaśnością,
- nieżytem żołądka,
- chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Sposób użycia:

- Należy zażyć łyżkę stołową (15ml), raz dziennie wieczorem, na pusty żołądek, najlepiej ok. 5 godzin po ostatnim posiłku.

Przeciwwskazania do stosowania:

- Ze względu na wysoką lepkość wyrobu medycznego Avilin Gastro 110ml nie należy stosować w przypadku zapalenia pęcherzyka żółciowego i uszkodzenia miększu wątroby.
- Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.
- Uczulenie na składniki preparatu.

Avilin Gastro 110ml

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego



1434

Ostrzeżenia w zakresie stosowania:

- Nie stosować dłużej niż 28 dni. W przypadku konieczności dłuższego stosowania wyrobu medycznego Avilin Gastro 110ml należy zrobić kilkudniową przerwę.
- W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku poprawy bądź nasilenia się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.
- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania
- Stosowanie podczas ciąży i karmienia należy skonsultować z lekarzem.
- Nie aplikować do oczu
- Chronić odzież przed poplamieniem
- Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Nie stosować po upływie terminu przydatności.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia lub rozszczelnienia opakowania.
- Należy używać wyrobu medycznego Avilin Gastro 110ml tylko zgodnie z przeznaczeniem,
- Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest kompletne opakowanie jednostkowe.

Warunki stosowania, przechowywania, i transportu:

- Wyrób medyczny Avilin Gastro 110ml należy stosować, przechowywać oraz transportować w temperaturze -5 do +50 °C.

Termin ważności:

- Nie należy używać wyrobu medycznego Avilin Gastro 110ml po upływie terminu ważności.



Nes Pharma Ryszard Pisklak Spółka Jawna, ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów; tel: 14 626 85 20

Wyjaśnienie zastosowanych symboli



Wytwórca



Zapoznaj się z instrukcją użycia



Numer partii produkcyjnej



Chronić przed światłem słonecznym



Wyrób nie jest sterylny



Data ważności

Avilin Gastro 110ml

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego



1434



Warunki stosowania
przechowywania i
transportu



Nie używać w przypadku
uszkodzonego
opakowania

Wersja 03/2025